

medical line



**ORLETT**

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению  
ортопедических изделий

**БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ  
ПОЗВОНОЧНИКА (ШИНА ШАНЦА)**

**БН6-53**

[WWW.ORLETT.RU](http://WWW.ORLETT.RU)

## **СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

---

- стабилизация и разгрузка шейного отдела позвоночника;
- ограничение подвижности в шейном отделе позвоночника;
- фиксация положения головы и шеи в положении, снижающем нагрузку на мышцы и связочный аппарат;
- уменьшение напряжения мышечных групп шеи и надплечья;
- улучшение кровообращения головы и шеи;
- легкий теплосберегающий эффект тканей шейного отдела.

Отпускается без рецепта.

## **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

---

- болевые ощущения в шее;
- комплексное лечение головной боли, головокружения;
- состояния после инсультов (симптомы нарушения кровотока по позвоночным артериям);
- комплексное лечение остеохондроза шейного отдела позвоночника (после массажа, физиотерапевтического лечения, лечебной физкультуры);
- состояния после травм и операций шейного отдела позвоночника;
- повышенная подвижность позвонков в шейном отделе;
- нарушения тонуса мышц шеи;
- профилактика заболеваний шейного отдела позвоночника при длительном напряжении мышц шеи и надплечий (при работе за компьютером, при длительных поездках в транспорте и др.);
- фиксация после обширных повреждений мягких тканей шеи (профилактика рубцовой деформации);
- шейный миозит;
- шейный корешковый синдром.

## **РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ**

---

Режим и сроки ношения бандажей Orlett (шин Шанца) назначает лечащий врач. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

## ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

---

- индивидуальная непереносимость материалов бандажа для шейного отдела;
- острые заболевания кожи в области применения изделия;
- открытые раны в области применения изделия.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

---

При появлении дискомфорта в области применения бандажа следует немедленно прекратить использование изделия и проконсультироваться с врачом относительно его дальнейшего применения.

## ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

---


Бандаж Orlett на шейный отдел позвоночника (шину Шанца) размещают у передней поверхности шеи так, чтобы подбородок расположился в выемке по середине верхнего края шины Шанца. Шину застёгивают на задней поверхности шеи с помощью застёжки-липучки велкро, обеспечив плотное прилегание бандажа Orlett к коже по всей окружности шеи.

## ПРАВИЛА ПОДБОРА

---

Для корректного подбора бандажа Orlett на шейный отдел необходимо измерить сантиметровой лентой два параметра: окружность и высоту шеи. Первый параметр измеряется по длине окружности шеи у ее основания. Для определения второго параметра необходимо в вертикальном положении головы измерить расстояние от угла нижней челюсти до ключицы.

В соответствии с таблицей подбора размера подбирается нужный артикул (индекс) бандажа Orlett.

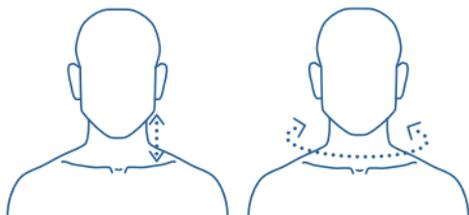

## ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Артикул/индекс	Размеры, см	
	Окружность шеи	Высота шеи
БН6-53-8-1	30-35	8
БН6-53-8-2	35-45	8
БН6-53-9-1	30-35	9
БН6-53-9-2	35-45	9
БН6-53-10-1	30-35	10
БН6-53-10-2	35-45	10
БН6-53-11-1	30-35	11
БН6-53-11-2	35-45	11
БН6-53-12-1	30-35	12
БН6-53-12-2	35-45	12

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется при- мерить изделие. Важно, чтобы бандаж был удобен.

## ПРАВИЛА УХОДА

Правильный уход за бандажами Orlett на шейный отдел позвоночника позволяет сохранить лечебные свойства изделий в течение всего гарантийного срока службы изделия:

- стирать вручную при температуре не выше 30°C;
- не применять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор;
- не применять машинную стирку;
- дополнительный чехол можно стирать ежедневно, в том числе в стиральной машине (в режиме деликатной стирки);
- отжимать не выкручивая;
- сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей;
- сушить изделие рекомендуется в расправленном положении на горизонтальной поверхности.



## **СОСТАВ**

Основа: 100% пенополиуретан. Чехол: 90% вискоза, 10% лайкра.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Изделие должно храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

## **УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ**

Изделие утилизировать с бытовым мусором.

## **СРОК ГОДНОСТИ**

Срок годности не установлен. Возможность использования изделия дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования изделия без согласования с лечащим врачом.

Не допускается самостоятельное изменение конструкции изделия. Не допускается эксплуатация поврежденного изделия.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

## **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Ортопедическое изделие арт. БН6-53, инструкция по применению.

## **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК**

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

## **ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ**

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.



**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА  
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04605 от 01.04.2009 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС RU.ИМ08.Д00818 (с 07.07.2014 г. по 06.07.2019 г.) выдана ООО «Медполимер-С».

**Производитель:** ООО «ТРЕЛАКС» для Рехард Технолоджис ГмбХ, Россия, 123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 5, стр. 4.

**Претензии направлять:** Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

