

medical line



ORLETT

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению
ортопедических изделий

**ОРТЕЗ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ УСИЛЕННЫЙ,
ПЛАСТИКОВЫЙ, С ГЕЛЕВЫМИ ПОДУШКАМИ**

TAN-201 G

WWW.ORLETT.RU

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Ортез Orlett на голеностопный сустав, усиленный, пластиковый, с гелевыми подушками используется для стабилизации голеностопного сустава и ограничения боковых движений. Охлажденные в морозильной камере в течение 15-20 минут гелевые подушки ортеза позволяют уменьшить болевой синдром и отек мягких тканей сустава в первые сутки после травмы, в период воспалительного заболевания или после оперативного лечения. Отпускается без рецепта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- повреждения связок голеностопного сустава;
- ушибы, острые травмы лодыжек;
- реабилитация после вывихов, подвывихов голеностопного сустава;
- болевой синдром и отеки после операций и травм костей и мягких тканей голеностопного сустава.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения ортеза назначает лечащий врач. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения ортеза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

В случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области применения ортеза необходима консультация лечащего врача.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего использования ортеза.

ВНИМАНИЕ!

Не следует затягивать фиксирующие ремни слишком сильно, во избежание нарушения кровообращения.

КОНСТРУКЦИЯ

Цифры на рис. 1, рис. 2 соответствуют следующим элементам конструкции:

1. Две боковые накладки, повторяющие форму ноги, изготовленные из пластика повышенной прочности, устойчивого к механическим нагрузкам.
2. Две гелевые подушки к боковым накладкам, обеспечивающие плотное прилегание ортеза к голеностопному суставу. Гелевые подушки, охлажденные в холодильнике в течение 10-15 минут, сохраняют низкую температуру до двух часов.
3. Регулирующий ремень с застежками-липучками велкро.
4. Два фиксирующих ремня с застежками-липучками велкро.
5. Подошвенная часть ортеза.



рис. 1

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

1. Ортез можно одевать на правую и на левую ногу. Отрегулируйте с помощью ремня (3) положение подошвенной части ортеза (5) так, чтобы подошвенная часть расположилась посередине, а нижние края боковых накладок касались подошвы. (см. рис. 1 и 2).

2. Прикрепите к пластиковым накладкам охлажденные гелевые подушки и разместите ортез на голеностопном суставе так, чтобы выемки в пластиковых накладках располагались в области костных выступов голеностопного сустава и плотно прилегали к лодыжкам (см. рис. 3).
3. Зафиксируйте ортез фиксирующими ремнями (4) сначала в нижней части голени (см. рис. 4), затем в верхней части ортеза (см. рис. 5). Отрегулируйте натяжение фиксирующих ремней с застежками-липучками велкро, обеспечив плотное прилегание ортеза к голени.



рис. 2



рис. 3



рис. 4



рис. 5



рис. 6

ПРАВИЛА ПОДБОРА

Ортез Orlett на голеностопный сустав усиленный, пластиковый, с гелевыми подушками имеет универсальный размер, одевается как на правую, так и на левую ногу.

ПРАВИЛА УХОДА

Для пластиковых частей ортеза предусмотрена влажная обработка при температуре не выше 40°C. Не применять хлорсодержащие

моющие и отбеливающие средства. Не применять машинную стирку. Сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ

30% полипропиленовый пластик, 5% полиамид, 60% пропиленгликоль, 5% поливинилхлорид.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Ортез должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования изделия дольше, чем предписано курсом лечения должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования изделия без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции изделия. Не допускается эксплуатация поврежденного изделия.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. TAN-201 G, инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09552 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д74411 (с 12.04.2017 г. по 12.04.2020 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию».

Производитель: Рехард Технолджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамерштрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

