

**ГЕЛЕВО-ТКАНЕВЫЕ КОЛЫЦА (ЗАЩИЩАЮЩИЕ)**

**TAOS Gel**

Арт. 000411-05



Мягкие и комфортные защитные колыва TAOS изготовлены из износостойкого трикотажа. Внутри трикотажного колыва имеется подушка из специального полимерного геля TRIBLOCK. Минеральное масло, входящее в состав геля TRIBLOCK, смягчает и увлажняет кожу. Гель безопасен для кожи и не вызывает аллергии. При постоянном использовании защитные колыва TAOS эффективно помогают устранить боль и дискомфорт при мозолях, потертостях, деформации, лечении ушибов и воспалений суставов пальцев ног. Колыва TAOS предназначены для многообразного применения и идеально подходят для чувствительной кожи.

**ПРИСПОСОБЛЕНИЕ-ПЕЛОТ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ (ЗАЩИЩАЮЩИЙ)**

**FORMAN Gel**

Арт. F-00043-05



Мягкий, комфортный гелевый пелот FORMAN сделан из специального полимерного геля TRIBLOCK, безопасного для кожи и не вызывающего аллергии. Подушка прочно крепится на ногу долговечной трикотажной эластичной манжетой. Для использования изделия на правой и левой ноге манжету выворачивают наизунану. При постоянном использовании гелевые пелоты FORMAN помогают быстро и эффективно устранить болевые ощущения и дискомфорт в чувствительных частях стопы при натоптышах, мозолях, потертостях, воспалении кожи и на ранках стадиях Hallux valgus («ногости») на ногах при отклонении большого пальца наружу). Пелот переднего отдела стопы FORMAN предназначены для многообразного применения во всех типах обуви и идеально подходят для чувствительной кожи.

**НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

- мозоли межпальцевых суставов;
- молоткообразные пальцы;
- переносившиеся пальцы;
- котгеобразные пальцы;
- профилактика образования мозолей и травмирования пальцев об обувь;
- для использования в любом типе обуви.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**  
надевается на палец стопы на поврежденное место.

**ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:**

- быстро уменьшает болевые ощущения и дискомфорт;
- защита от контакта с обувью;
- эффективное смягчение кожи в области контакта с гелем.

**ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:**  
не использовать при открытых, кровоточащих и молющих ранах.

**СОСТАВ:**  
гель TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных масел. Минеральные масла увлажняют кожу и способствуют смягчению мозолей.

**УХОД:**  
колыва ежедневно моют теплой водой с детским мылом, сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей, после чего гелевую поверхность приподнимают тальком или детской присыпкой.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:**  
14 дней со дня продажи (на сохранение механических свойств).

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**  
2 шт. в упаковке.

**РАЗМЕР:**  
S, M, L.

**КРУГЛЫЕ ГЕЛЕВЫЕ ВСТАВКИ (КОРРИГИРУЮЩИЕ)**

**INTON Gel**

Арт. F-00054-05



Мягкие и комфортные мембранчатые вставки INTON изготовлены из специального полимерного геля TRIBLOCK. Минеральное масло, входящее в состав геля TRIBLOCK, смягчает и увлажняет кожу. Гель безопасен для кожи и не вызывает аллергии. При постоянном использовании гелевые вставки INTON помогают быстро и эффективно устранить болевые ощущения и дискомфорт в межпальцевых промжутках при мозолях, потертостях, деформации, лечении ушибов и воспалений суставов пальцев ног. Вставки INTON предназначены для многообразного применения и идеально подходят для чувствительной кожи.

**НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

- Hallux valgus (отклонение большого пальца стопы наружу);
- мозоли в проемии межпальцевых суставов;
- переносившиеся пальцы;
- потертости;
- повреждения кожи пальцев стопы;
- врожденные ногти;
- состояние после операции по поводу Hallux valgus.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**  
изделие размещают между пальцами стоп (чаще вкладывают между первым и вторым пальцами). Более широкая часть должна располагаться с подошвенной стороны стопы.

**ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:**  
• раздвигает прижимает друг к другу пальцы;  
• предотвращает трение, потертости, мозоли;  
• минеральное масло в составе геля TRIBLOCK эффективно смягчает кожу.

**ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:**  
не использовать при открытых и молющих ранах.

**СОСТАВ:**  
гель TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных масел. Минеральные масла увлажняют кожу и способствуют смягчению мозолей.

**УХОД:**  
вставки ежедневно моют теплой водой с детским мылом, сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей, после чего приподнимают тальком или детской присыпкой.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:**  
14 дней со дня продажи (на сохранение механических свойств).

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**  
2 шт. в упаковке.

**РАЗМЕР:**  
S, L.

**ГЕЛЕВО-ТКАНЕВЫЕ БУРСОПРОТЕКТОР (ЗАЩИЩАЮЩИЙ)**

**ALTIS Gel**

Арт. F-000421-00



При постоянном использовании прокладка ALTIS эффективно помогает устранить болевые ощущения и дискомфорт в «ногостях» (плюсневых суставах) больших пальцев) при потертостях, деформации, ушибах и воспалениях на фоне Hallux valgus, а также при подагре, отклонении солей, артрозе и воспалении кожи сустава.

**НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

- начальная степень Hallux valgus (отклонение большого пальца стопы наружу);
- артрозо-артриты и бурситы первого плюсне-фалангового сустава;
- трещины;
- мозоли и натоптыши в области первого плюсне-фалангового сустава;
- подагра;
- послеоперационный период.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**  
надевается кольцом на первый палец гелевой поверхностью к коже и располагается в области первого плюснефалангового сустава. Прокладка ALTIS удобно крепится на большой палец, предназначена для многообразного применения и идеально подходит для чувствительной кожи. Надев прокладку ALTIS PLUS, можно ходить во всех типах обуви.

**ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:**  
• защита от давления, трения и образования потертостей воспаленной суставной сумки первого плюснефалангового сустава;
- защита от контакта с обувью;
- эффективное смягчение кожи в области контакта с гелем.

**ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:**  
не использовать при открытых и молющих ранах.

**СОСТАВ:**  
гелевая пластина, покрытая с внешней стороны тканью. Гель TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных масел. Минеральные масла увлажняют кожу и способствуют смягчению мозолей.

**УХОД:**  
бурсопротектор ежедневно моют теплой водой с детским мылом, сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей, после чего гелевую поверхность приподнимают тальком или детской присыпкой.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:**  
14 дней со дня продажи (на сохранение механических свойств).

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**  
1 шт. в упаковке.

**РАЗМЕР:**  
универсальный.

**ГЕЛЕВАЯ ПОДУШКА БУРСОПРОТЕКТОР (ЗАЩИЩАЮЩАЯ)**

**ALTIS PLUS Gel**

Арт. F-00042-00




Мягкая и комфортная гелевая подушка (бурсопротектор) ALTIS PLUS сделана из специального полимерного геля TRIBLOCK. Минеральное масло, входящее в состав геля TRIBLOCK, смягчает и увлажняет кожу. Гель безопасен для кожи и не вызывает аллергии. При постоянном использовании гелевая подушка ALTIS PLUS помогает быстро и эффективно устранить болевые ощущения и дискомфорт в «ногостях» (плюсневых суставах) больших пальцев) при потертостях, деформации, ушибах и воспалениях на фоне Hallux valgus, а также при подагре, отклонении солей, артрозе, воспалении кожи и суставной сумки в том числе после операций. Подушка ALTIS PLUS удобно крепится на большой палец, предназначена для многообразного применения и идеально подходит для чувствительной кожи. Надев подушку ALTIS PLUS, можно ходить в широкой обуви.

**ГЕЛЕВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ВКЛАДЫШИ ОТ НАТОПТЫШЕЙ (ЗАЩИЩАЮЩИЕ)**

**JOLLI\* Gel**

Арт. F-00073

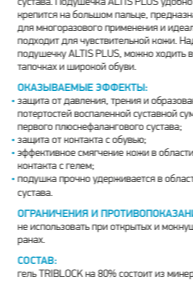

Гелевые защитные вкладыши от натоптышей JOLLI\* предназначены для защиты подошвенной части переднего отдела стопы при натоптышах, мозолях и трещинах. Мягкая рельефная поверхность гелевых вкладышей эффективно предотвращает скольжение стоп в обуви и существенно повышает комфорт при ходьбе.

**НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

- Hallux valgus (отклонение большого пальца стопы наружу);
- артрозо-артриты и бурситы первого плюсне-фалангового сустава;
- трещины;
- мозоли и натоптыши в области первого плюсне-фалангового сустава;
- подагра;
- послеоперационный период.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**  
надевается кольцом на первый палец и располагается в области первого плюснефалангового сустава. Подушка ALTIS PLUS удобно крепится на большой палец, предназначена для многообразного применения и идеально подходит для чувствительной кожи. Надев подушку ALTIS PLUS, можно ходить в любых типаках и широкой обуви.

**ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:**  
• защита от давления, трения и образования потертостей воспаленной суставной сумки первого плюснефалангового сустава;
- защита от контакта с обувью;
- эффективное смягчение кожи в области контакта с гелем;
- подушка прочно удерживается в области сустава.

**ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:**  
не использовать при открытых и молющих ранах.

**СОСТАВ:**  
гель TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных масел. Минеральные масла увлажняют кожу и способствуют смягчению мозолей.

**УХОД:**  
бурсопротектор ежедневно моют теплой водой с детским мылом, сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей, после чего гелевую поверхность приподнимают тальком или детской присыпкой.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:**  
14 дней со дня продажи (на сохранение механических свойств).

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**  
1 шт. в упаковке.

**РАЗМЕР:**  
универсальный.

**СВОЙСТВА ТОВАРА**

- Гелевые вкладыши применяются при:
  - начальной и средней степени Hallux valgus (отклонение большого пальца стопы наружу);
  - трещинах, потертости в основании пальцев;
  - мозолях и натоптышах в области первого плюснефалангового сустава;
  - начальной и средней степени Hallux valgus (отклонение большого пальца стопы наружу).

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**  
размещается в обуви в области плюснефаланговых суставов.

**ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:**

- защищают от контакта с обувью;
- эффективно смягчают кожу в области контакта с гелем;
- защищают передний отдел стопы от ударных нагрузок при ходьбе в любом типе модельной обуви.

**ОГРАНИЧЕНИЯ:**  
не использовать при открытых, кровоточащих и молющих ранах.

**СОСТАВ:**  
гель TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных масел. Минеральные масла увлажняют кожу и способствуют смягчению мозолей.

**УХОД:**  
вкладыши моют теплой водой с детским мылом, сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Изделия из геля могут повторно использоваться после мытья или очистки.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:**  
14 дней со дня продажи (на сохранение механических свойств).

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**  
2 шт. в упаковке.

**РАЗМЕР:**  
универсальный.

\* Товар не является медицинским изделием и не подлежит обязательной сертификации.

**ЭЛАСТИЧНАЯ СТЯЖКА ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ (РАЗГРУЖАЮЩАЯ)**

**VESTA Gel**

Арт. F-00009-05



Удобная эластичная ортопедическая стяжка VESTA возвращает кости стопы в анатомически правильное положение. Упругий пелот стяжки VESTA бережно и надежно поддерживает нормальную арочную форму стопы. При постоянном использовании стяжки VESTA уменьшается утомляемость ног при ходьбе, чувство усталости и боли при плоскостопии и Hallux valgus («ногости») на ногах при отклонении большого пальца наружу). Стяжка VESTA удобно крепится на стопе и предназначена для многообразного применения. Стяжки VESTA носят в широкой обуви 2-4 часа в день.

**НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

- поперечная распластанность стоп;
- начальная и средняя степени Hallux valgus (отклонение большого пальца стопы наружу);
- травмы и деформации плюснефаланговых суставов;
- предназначена для многообразного применения в широкой повседневной обуви.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**  
манжету-стяжку надевают (натягивают) на стопу так, чтобы пелот переднего свода стопы располагался в области поперечного свода.

**ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:**

- эффективно поддерживает нормальную арочную форму переднего отдела стопы;
- нормализует анатомическое положение костей стопы;
- уменьшает отек стопы;
- уменьшает в стопах боль и дискомфорт;
- изделие предназначено для лечения комбинированного и поперечного плоскостопия.

**ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:**  
не использовать при открытых и молющих ранах.

**СОСТАВ:**  
изделие состоит из эластичной трикотажной стяжки и пелота из вулканизированного латекса.

**УХОД:**  
стяжку периодически стирают в теплой воде с детским мылом, после чего сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:**  
30 дней со дня продажи (на сохранение механических свойств).

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**  
1 шт. в упаковке.

**РАЗМЕР:**  
S 16,5 см, M 18 см, L 19 см (длина окружности стопы в области предплюсны).

