

Nea ©



1 1036-40 1 / 4

Designed in the Netherlands
Made in the EU

www.push.eu

Nea International bv
Europalaan 31
6199 AB Maastricht-Airport
The Netherlands




1 40.1



CARE

Ортез на спину
пояснично-крестцовый
LOW BACK BRACE

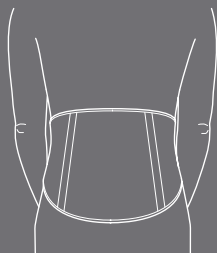

Ортезы серии Care* торговой марки Push — оптимальное решение для защиты и профилактики.

Ортезы Push Care предназначены, в первую очередь, для профилактического применения в случаях физических нагрузок. Эти ортезы успешно защищают человека также в случаях незначительных травм и умеренных нарушениях функции суставов. Отличительной особенностью является легкая степень фиксации и умеренная компрессия.

Продукция Push care является инновационной и произведена для Вас с особой тщательностью для максимальной безопасности и комфортного использования.

Перед использованием ортеза внимательно прочитайте инструкцию.

Если у Вас имеются какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь за консультацией к дистрибьютору или отправьте электронное письмо по адресу sales@nikamed.ru

* Care – забота

ОРТЕЗ НА СПИНУ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ PUSH CARE BACK BRACE АРТИКУЛ: 1.40.1

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Хронические неспецифические заболевания пояснично-крестцового отдела позвоночника.
- Вторичная профилактика повреждений при нагрузках на поясничный отдел.
- Ишиас, острые радикулиты, люмбаго.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ

- Использование в конструкции высококачественного комфортного материала Sympress™ позволяет надевать корсет как на нательный трикотаж, так и на голое тело.
- Пояснично-крестцовый корсет рекомендуется надевать в положении лежа на спине.
- Фиксацию корсета на теле обеспечивают застежки «Велкро». Корсет должен обеспечивать комфортную компрессию. Если ощущаемое давление слишком велико, корсет следует ослабить.

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


- При использовании корсета Push care Back Brace может потребоваться консультация лечащего врача.
- Специалисты компании-дистрибьютора объяснят Вам правила надевания корсета Push care Back Brace.
- Сохраните вкладыш с информацией о продукции, чтобы всегда иметь возможность прочесть инструкции по правильному использованию корсета.
- Проконсультируйтесь у специалиста, если корсет Push care Back Brace требует индивидуальной подгонки.
- Функциональность снижается при износе отдельных элементов корсета Push care Back Brace или при расхождении швов. Не забывайте проверять корсет Push care Back Brace на наличие признаков повреждения перед каждым использованием.

СВОЙСТВА ТОВАРА/ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ


Корсет Push care Back Brace ослабляет боль в пояснично-крестцовой области спины путем равномерного распределения нагрузки на позвоночник. Съемная подушка обеспечивает оптимальное прилегание корсета к пояснице и крестцу. При необходимости можно отрегулировать положение съемной подушки. Благодаря используемым материалам корсет комфортен для ношения как при стоячей, так и при сидячей работе, как дома, так и на работе. Анатомический крой корсета удобен как для мужчин, так и для женщин, а также предупреждает смещение корсета. Небольшая толщина корсета и плотное прилегание к телу делают его невидимым при ношении под одеждой. Степень компрессии можно легко регулировать в соответствии с Вашими предпочтениями. Высококачественный комфортный материал Sympress™ обеспечивает оптимальный влаго-воздухообмен (система термоконтроля).

Пояснично-крестцовый корсет Push care Back Brace удобен для самостоятельного надевания без посторонней помощи и рассчитан на регулярный гигиенический уход (стирку).

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ АРТИКУЛ: 1.40.1

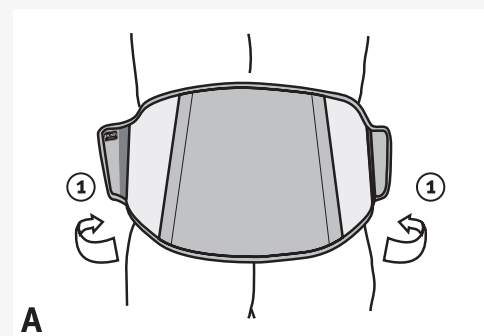

A

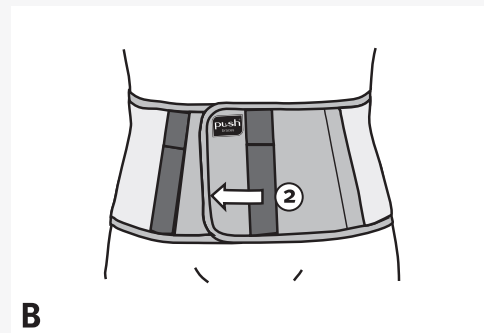

B

Инструкция по применению



• РУ

Артикул 1.40.1

Производитель NEA International BV
(NEA Интернешнл БиВи)
www.push.eu

Импортер ООО «Орто Медикл Групп»
Россия,
143405, Московская область,
г. Красногорск,
Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять Россия,
127220, Москва, а/я № 58,
ООО «НИКАМЕД»
представитель в России и СНГ,
тел.: 8-800-33-33-112,
e-mail: skk@nikamed.ru.

Товар является медицинским изделием
Отпускается без рецепта

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2009/04855 от 25.03.2016 г.
выдано Росздравнадзором,
срок действия не ограничен



Декларация о соответствии
№ РОСС NL.АЯ46.Д72393
(с 04.04.2016 г. по 04.04.2019 г.) выдана ЗАО
«Региональный орган по сертификации и
тестированию»



ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказания к использованию
пояснично-крестцового корсета:

- беременность;
- невралимые грыжи брюшной стенки;
- диафрагмальные грыжи;
- синдром портальной гипертензии.

Предостережение:

Избегайте чрезмерно тугого наложения корсета.


В случае сохранения боли или ухудшения состояния
обязательно обратитесь за консультацией к лечащему врачу.

ПОДБОР РАЗМЕРА

Сантиметровой лентой измеряется окружность талии
(см. рисунок на упаковке). Пояснично-крестцовые корсеты
Push care Back Brace выпускаются в шести размерах
(см. таблицу размеров на упаковке). Чтобы убедиться в
правильном выборе размера, рекомендуется примерить
корсет.

ПРАВИЛА УХОДА

Чтобы продлить срок службы, после ношения ортез следует
просушить. Перед стиркой застегните застежки-липучки
«Велкро». Машинная стирка в щадящем (деликатном)
режиме или ручная стирка при температуре не выше +30 °С.
Не применять хлорсодержащие моющие и отбеливающие
средства. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных
приборов и прямых солнечных лучей.

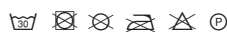

СОСТАВ ИЗДЕЛИЙ

Корсет изготовлен из высококачественного комфортного
материала Sympress™. Использование микроволокон
обеспечивает ощущение мягкости и поддерживает кожу
сухой.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

1, 2, 3, 4, 5, 6

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие, инструкция по применению.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен. По окончании периода
использования товар не представляет опасности для
потребителя и подлежит утилизации. Возможность
использования ортеза дольше, чем предписано курсом
лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается
прекращение использования ортеза без согласования
с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное
изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация
поврежденного ортеза.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

90 дней с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие вследствие нарушения инструкции по применению, правил хранения и ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Изделия должны храниться в оригинальной упаковке, при
комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от
источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие утилизировать с бытовым мусором.

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ АРТИКУЛ: 1.40.1

